


# Lifepak CR 2 Wifi -käyttöönotto

Tässä artikkelissa käymme läpi Lifepak CR 2 Wifi -version käyttöönoton

Onneksi olkoon! Olet tehnyt hyvän hankinnan päättäessäsi panostaa sydänturvallisuuteen Physio-Control Lifepak CR 2 -sydäniskurilla. Wifi -versio on mahdollista kytkeä verkkoon, joten käymme tällä sivustolla laitteen käyttöönoton läpi.

## Tarkista ensin laitteesi

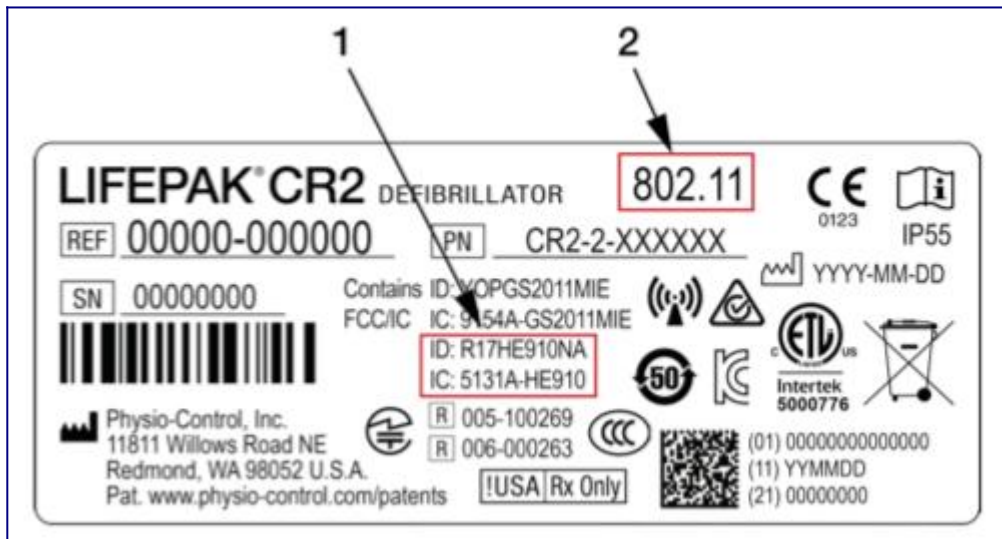

Laitteen tarra löytyy akkulokerosta. Jos laitteeseen on asennettu jo akku paikalleen, irrota akku nähdäksesi tarran tiedot. Jos laite on 3G -yhteydellä varustettu, kuvan 1 mukaisessa kohdassa on ID ja IC -tekstit. Jos laite on Wifi -yhteydellä varustettu, kuvan 2 mukaisessa kohdassa on teksti 802.11. Jos kummassakaan kohdassa ei ole tekstiä, laite on USB -yhteydellä varustettu.

## Esivaatimukset

**KOHTA 1.** Kytkeäksi Wifi -laitteen tiedonsiirron toimintaan, sinun tulee tehdä tunnus LIFELINKcentral -palveluun (<https://lifelink-fi.lifenetsystems.com/Profile/Logon>). Jos sinulla on jo tili, voit ohittaa tämän vaiheen.



LIFELINKcentral™  
AED PROGRAM MANAGER

[Unohtuiko salasana?](#)

[Hae/luo tili](#)

Kirjaudu osoitteeseen <https://lifelink-fi.lifenetsystems.com/Profile/Logon> ja klikkaa Hae/luo tili

## Hae/luo tili



Valitse maa.

Maa\*



Valitse maaksi Suomi

## Hae/luo tili ✕

Voit hakea tilin tiedot antamalla sähköpostiosoitteen, jonka ilmoitit tilauksen yhteydessä. Jos tilin sähköpostiosoite ei ole tiedossa, anna oma sähköpostiosoitteesi, jotta voit hakea tai luoda tilin laitteen tietojen perusteella.

Sähköposti\*

Anna sähköpostiosoitteesi ja jatka rekisteröitymistä.

Rekisteröitymisen jälkeen (tai jos sinulla on jo LIFELINKcentral -tili, voit siirtyä kohtaan 2.


**KOHTA 2.** Asenna tietokoneellesi [Wi-Fi Configuration Tool](#) (Wi-Fi -määrittästyökalu) -yhteystyökalu voidaksesi asettaa Lifepak CR 2:lle käytettävän langattoman verkon. Voit ladata ohjelman tästä linkistä tai kirjautuessasi LIFELINKcentral -tilille löydät uusimman version "Resource Center" tai suomenkielisessä versiossa "Resurssikeskus" -välilehdeltä.

Valitse Wi-Fi Configuration Tool -sovelluksen "Rekisteröinti" välilehdellä maaksi Suomi ja anna samat kirjautumistunnukset, jotka sinulla on käytössä LIFELINKcentral -tilillä. Seuraavaksi näyttöön tulee ohje yhdistää Lifepak CR 2 tietokoneeseen.

Ota myyntipakkauksesta USB -kaapeli ja yhdistä kaapelin leveämpi pää tietokoneeseen ja kapeampi pää Lifepak CR 2:een. Lifepak CR 2:n takapuolella kahvan alla on "USB" -tekstillä merkitty kuminen suojuus, jonka irrottamalla löytyy kytkentäpaikka USB -kaapelille.

Kun USB -kaapeli on kytketty Lifepak CR: 2:n ja tietokoneen välille, avaa Lifepak CR 2:n kansi. Älä huomioi äänikehoitteita - Lifepak käynnistää tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen ja sydäniskurin välille.

Seuraavaksi sinun tulee määrittellä Wi-Fi -verkkoasetukset. Valitse luettelosta haluamasi langaton verkko (Wi-Fi) ja tarvittaessa anna suojausavain (salasana Wi-Fi -verkkoon). Tämän jälkeen klikkaa "Seuraava" ja Lifepak CR 2 yrittää yhdistää kyseiseen verkkoon. Kun asennus on valmis, ohjelmisto ilmoittaa että "Päivitys onnistui". Valitse seuraava, irrota USB -johto ja valitse sitten "Sulje". Voit nyt laittaa sydäniskurin kannen kiinni.

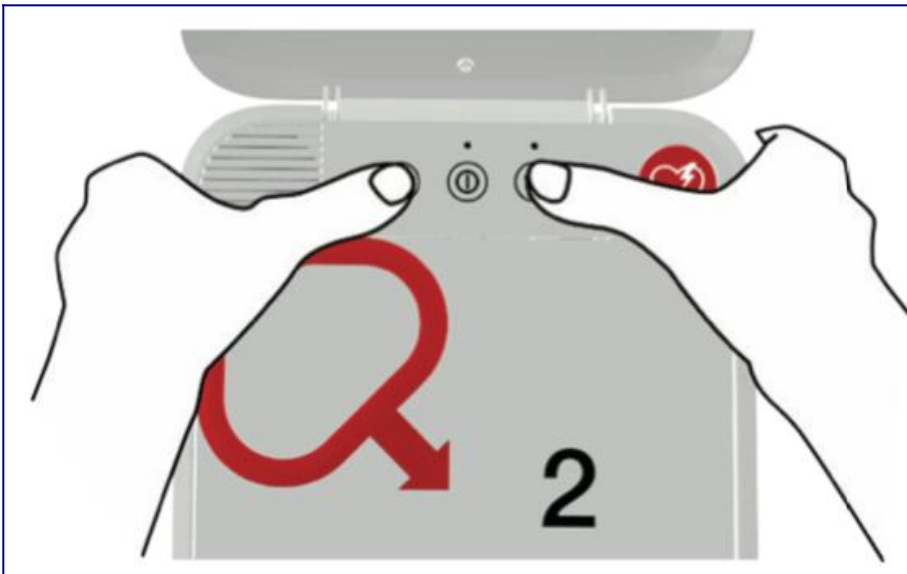

Voit nyt viedä Lifepak CR 2:n haluttuun asennuspaikkaan. Mikäli haluat vielä varmistua, että laite saa yhteyden verkkoon, paina kuvan mukaisia painikkeita yhtäaikaan kunnes kuulet että laite ilmoittaa "Laite valmis".

### Defibrillaattorin tilan varmistaminen verkon kautta

Varmista, että defibrillaattorin tila LIFELINKcentral AED -hallintaohjelmassa on päivittynyt, kirjautumalla tilille ja tarkistamalla, että defibrillaattorin tila on se, joka on kuvattu alla. Jos tila ei ole VALMIS, tukea saadaan ottamalla yhteyttä Physio-Controlin paikallisedustajaan tai paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään.

1. Kirjaudu omalle [LIFELINKcentral-tilille](#).
2. Siirry LAITTEISTO-sivulle ja varmista, että laitteen tila on VALMIS vihreällä.

