



*Riskien mukaiset*

# ENSIAPUTARVIKKEET TYÖPAIKOILLE



# Työpaikan ensiapuvalmius

[ensiapukurssit@terveystalo.com](mailto:ensiapukurssit@terveystalo.com)

[www.terveystalo.ensiapuvalineet.com](http://www.terveystalo.ensiapuvalineet.com)





## TYÖPAIKOILLA SATTUU JA TAPAHTUU – KOKO AJAN. VARAUDU OIKEIN.

Työturvallisuuslain 46§ edellyttää ensiapuvalmiuden ylläpitämistä työpaikoilla; kattaen niin henkilökunnan kuin kiinteistöissä vierailevien henkilöiden tarpeet. Mutta löytyykö työpaikoilta riittävästi ja oikeita ensiaputarvikkeita työn luonteeseen, olosuhteisiin sekä työntekijöiden määrään nähden – jokaisen kiinteistön, kerroksen ja työpisteen osalta?

Työpaikkaselvityksen yhteydessä tehty riskitekijöiden kartoitus ja arviointi ovat perusta ensiapuvalmiuden suunnittelulle. On tärkeää, että jokaisesta työpisteestä löytyy asianmukainen ensiapuvarustus. Tositilanteissa punnitaan tuotteiden riittävyys, toimivuus ja laatu.

*Nopealla ensiavulla ja oikeilla tuotteilla minimoidaan tapaturman aiheuttamat vammat – ja nopeutetaan paranemista.*

### ENSIAPUTARVIKKEIDEN TARVETTA ARVIOIDESSA TULEE HUOMIOIDA MM.:

- Nykyisen varustuksen riittävyys ja olosuhteet; tuotteiden kunto, siisteys ja käyttöaika.
- Ensiaputarvikkeiden sijoitus niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla, riittävän lähellä ja helposti löydettävissä sekä asianmukaisesti opastettuina.
- Ensiaputarvikkeiden määrä ja laatu niin, että ne vastaavat työpisteen riskejä. Kiinteää ensiapupistettä täydentää tarvittaessa mukaan otettava ensiapupakki.

- Työpaikoilla, joissa on kemikaalien roiskumisvaara, on silmien huuhtelua varten välittömästi saatavilla riittävä määrä neutraloivaa silmänhuuhtelunestettä ja huuhtelu on varmistettu vähintään 15 minuutin ajan.
- Työpisteet, joissa on palovammojen riski, on varustettu jäädyttävillä palovammatuotteilla.
- Toimivat rutiinit ensiapuvarustuksen ylläpitoon, säännöllisiin tarkistuksiin ja päivitykseen.

### ENSIAPUA KAIKILLE, KAIKKIALLA

Cederroth ensiaputuotteet on suunniteltu antamaan nopeaa ja tehokasta apua hätätilanteessa. Tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja kaikkien toimialojen riskien mukaisiin tarpeisiin ja kehitämme ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi antaa ensiapua ilman aikaisempaa erityisosaamista. Kotisivuiltamme löydät runsaasti tietoa ensiaputuotteista, niiden käytöstä ja mm. suositukset erityyppisille toimialoille.

*Kela korvaa valvottua ensiapua varten työpaikalle hankittujen ensiapuvälineiden kustannuksia työnantajalle/ryrittäjälle.*



## CEDERROTH ENSIAPUASEMA



Ensiapuuseman tuotteilla voidaan hoitaa erityyppisiä vammoja. Läpinäkyvät kannet suojaavat tarvikkeet pölyltä ja liialta. Asema on varustettu myös Salvequick laastariautomaatilla. Laastarit vedetään alaspäin, jotta vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen. Aseman lokerikossa on tilaa täydentää sisältöä oman työpisteen erityistarpeiden mukaan. Helposti ymmärrettävät ohjeet.

### CEDERROTH ENSIAPUASEMA REF 490920

Mitat: L 29 X K 56 X S 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
  - 1 (x 45) Salvequick muovilaastaria (REF 6036) ja
  - 1 (x 40) Salvequick kangaslaastaria (REF 6444)
- 1 (x 20) Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



### CEDERROTH TÄYDENNYSKOKKI ENSIAPUASEMAAN REF 51011002

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth huuhteluspray (REF 726000)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

## CEDERROTH HAAVANHOITO- AUTOMAATTI

Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä työpisteissä, joissa laastareiden tarve on ilmeinen. Tuotteet ovat lukitussa automaatissa käyttövalmiina, liialta ja kosteudelta suojaavan kannen alla. Runsas määrä eri kokoisia ja tyyppisiä laastareita harventaa täyttötarvetta ja varmistaa, että tuotteita on pidempään saatavilla. Lisänä haavapyyhkeet ja itsekiinnittyvä Soft laastari, joka pysyy paikoillaan jopa vedessä.

- Soft laastariautomaatti leikkurilla, sisältäen 4,5 m rullan
- Laastarit, haavapyyhkeet ja Soft laastari kätevässä automaatissa



### CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI REF 51011006

Mitat: L 30,6 X S 20,3 X K 15,5 cm

- 1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 21) Salvequick Iso kangaslaastari (REF 6470)
- 1 Avain

## CEDERROTH PIENI HAAVANHOITO- PISTE

Pieni haavanhoitopiste soveltuu työpaikoille, joissa tapaturman riski on vähäinen.



### CEDERROTH PIENI HAAVANHOITOPISTE REF 191400

Mitat: L 25 x K 40 x S 5 cm

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)



## CEDERROTH ENSIAPUPAKKI X-LARGE

Kovamuovista valmistettu lujatekoinen ja kestävä pakki suojaa tuotteet iskulta, pölyltä ja kosteudelta. Pakin ulkokannessa on laastariautomaatti. Tuotteet kuten käsineet, sakset ja elvytysuoja on sijoitettu pakin sisäkanteen. Lokerikon punaiset tarrat ilmaisevat, kun tuote on lopussa ja täydennystä tarvitaan. Huomiovärien ansiosta pakin havaitsee jo kaukaa. Tilaa silmänhuuhtelupullolle tai omille tuotevalinnoille.



Seinäteline  
REF 51000008



Laastari-  
automaatti  
kannessa



### ENSIAPUPAKKI X-LARGE

REF 390103

Mitat: L 42 x K 30 x S 12 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Huuhteluspray (REF 726000)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Paria suojäkäsine (REF 2596)
- 4 Käsienvuotospyyhe (REF 2596)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Salvequick Cold pack kylmäpusi (REF 219600)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 3 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1893)
- 2 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Sisällysluettelo
- 1 Ensiapuohje

## CEDERROTH ENSIAPULAUKKU LARGE & MEDIUM

Mukaan otettava hyvin varusteltu ensiapulaukku täydentää kiinteästi seinään asennettua Cederroth ensiapuasemaa. Huomioi myös ajoneuvot ja matkatyötä tekevät. Cederroth ensiapulaukun kulutusta ja kosteutta kestävä materiaali suojaa tuotteita liialta ja pölyltä. Seinäteline REF 190400 lisävarusteena.



### ENSIAPULAUKKU LARGE

REF 390102

Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Paria suojäkäsine (REF 2596)
- 2 Käsienvuotospyyhe (REF 2596)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 1 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Sisällysluettelo
- 1 Ensiapuohje

### ENSIAPULAUKKU MEDIUM

REF 390101

Mitat: L 23 x K 19 x S 8 cm

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Paria suojäkäsine (REF 2596)
- 2 Käsienvuotospyyhe (REF 2596)
- 6 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 10 Salvequick laastari (REF 1880)
- 4 Salvequick Maxi Cover laastari (REF 658024)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Sisällysluettelo
- 1 Ensiapuohje





## CEDERROTH PALOVAMMATUOTTEET

Cederrothilla on kattava valikoima jäähdyttäviä palovammatuotteita, olipa sitten kyse pienistä, tai hieman suuremmista palovammoista. Tuotteita on helppo käyttää selkein ohjein.

### CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU

Mukaan otettava ensiapupakkaus palovammojen ensiapuun. Burn Gel jäähdyttävät palovammatuotteet on tarkoitettu jäähdytykseen ja kivunlievitykseen ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa. Palovammataitoksia on kolmea eri kokoa, mm. isompi 30 x 40 cm taitos/ kasvomaski. Lisäksi monikäyttöinen palovammageeli. Palovammalaukku soveltuu työpaikoille, joilla on suuri palovammariski, kuten esimerkiksi tilityöt, avotuli, kuumia pintoja ja höyryä, kuumia nesteitä jne.

Uutuus!



### CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU

REF 51011013

Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 1 Burn Gel palovammageeli 100 ml (REF 51011005)
  - 1 Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30x40 cm (REF 51011014)
  - 2 Burn Gel palovammataitos 20x20 cm (REF 51011015)
  - 4 Burn Gel palovammataitos 10x10 cm (REF 901900)
  - 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
  - 1 Verkkoside (REF 1893)
  - 6 Sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen
  - 2 Paria suojakäsineitä
  - 1 Sakset (REF 270002)
- Ensiapuohje ja palovammojen hoito-ohjeet

**Lisävaruste:** Seinäteline REF 190400



**Cederroth Burn Gel 100 ml**  
REF 51011005

Palovammageeli pieniin ensimmäisen ja toisen asteen palovammoihin ja auringonpoltamiin. Jäähdyttää ja rauhoittaa ihoa sekä lievittää tehokkaasti kipua. Monikäyttöinen, voidaan käyttää useampaan kertaan.



**Cederroth Burn Cover**  
REF 901903

Vedenkestävä ja steriili sininen palovammalaastari, jonka hydrogeelityyny suojaa ja rauhoittaa pieniä palovammoja. Laastarit sopivat myös pieniin viiltohaavoihin ja hiertymiin.

Uutuus!



**Cederroth Burn Gel Palovammataitos/  
Kasvomaski 30x40 cm**  
REF 51011014

Soveltu laaja-alaisempien palovammojen ensiapuun, kuten jalat, kädet, rinta/selkä. Taitokseen on perforoitu silmä-, nenä- ja suuaukot, jolloin taitosta voidaan käyttää myös kasvojen palovammoissa. Jäähdyttää ja lievittää kipua ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa.



**Cederroth Burn Gel Palovammataitos**  
20x20 cm  
REF 51011015

Palovammataitos keskiuurten palovammojen ensiapuun. Käytä suuremmissa palovammoissa useampia taitoksia. Jäähdyttää ja lievittää kipua ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa.


Uutuus!



**Cederroth Burn Gel Palovammataitos**  
10x10 cm  
REF 901900

Soveltu pienten palovammojen ensiapuun. Cederroth Burn Gel palovammataitos jäähdyttää nopeasti, lievittää tehokkaasti kipua estäen palovamman etenemisen syvemmälle ihokudoksiin. 2 taitosta/rasia.





Asianmukainen silmänhuuhtelu on erityisen tärkeää työpaikoilla, joissa käytetään vaarallisia kemikaaleja. Tällaisia ovat mm. teollisuusympäristöt, laboratoriot, rakennustyömaat, suurkeittiöt ja varastot.

## SILMÄNHUUHTELU ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TYÖPAIKOILLA, JOISSA SILMÄVAMMOJEN RISKI ON SUURI.

Yleisimpiä silmävammojen aiheuttajia ovat räjähtävät akut sekä lipeän, ammoniakkin, sementin, kalkin, konetiskiaineen, puhdistusaineiden, joidenkin pesuaineiden, rasvanpoistoaineiden, maalien, pesusoodan ja liiman roiskeet. Myös metallilastut, lika ja pöly tulee huuhdella pois välittömästi, jotta ne eivät tartu silmään. Jos sinä tai joku lähelläsi saa vaarallista ainetta silmänsä, ensiapu on ratkaisevan tärkeää.

### *Emäkset aiheuttavat suurimman osan kaikista syöpymissivammoista.*

Kun silmiin joutuu emäksisiä tai happamia roiskeita, silmän pH-arvo muuttuu ja aiheutuu syöpymissivamma. Onnettomuuden sattuessa tärkeintä on huuhdella vaaralliset kemikaalit nopeasti pois ja pyrkiä palauttamaan silmän pH-arvo. Siksi Cederrothin silmänhuuhteluneste on boratti puskuroitu. Se toimii iskunvaimentajana ja palauttaa silmän normaalin pH-arvon tehokkaammin kuin pelkkä keittosuolaliuos.

#### **Esimerkkejä emäksistä:**


- Lipeä
- Sementti
- Ammoniakki
- Pesusooda
- Konetiskiaine

#### **Esimerkkejä hapoista:**

- Akkuhappo (rikkihappo)
- Suolahappo
- Fosforihappo
- Etikkahappo

**Emäkset** tunkeutuvat syvemmälle silmän kudoksiin ja saattavat aiheuttaa vakavia näkövammoja, jotka ovat usein pysyviä.

**Hapot** aiheuttavat silmän uloimpiin osiin syöpymissivammoja, jotka ovat usein hoidettavissa.

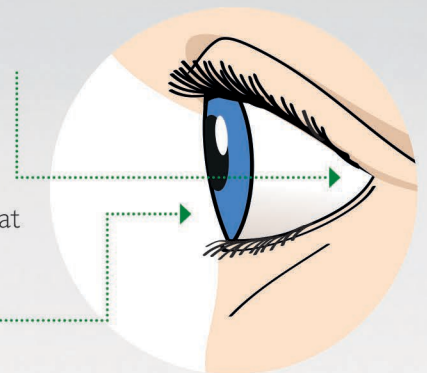

Pahimmassa tapauksessa syövyttävän aineen aiheuttamat silmävauriot voivat johtaa pysyvään vaurioon, kuten näön heikentymiseen tai sokeuteen.

Monet markkinoilla olevista silmänhuuhtelunesteistä ovat fosfaattipuskuroituja. Fosfaatilla on neutraloiva vaikutus syövyttävissä emäs- ja happoroiskeissa, mutta jos se joutuu kosketuksiin kalsiumionien kanssa, syntyy reaktio, joka saattaa aiheuttaa kalkkeutumista. Kalsiumioneja löytyy yleensä työpaikoilta, missä käsitellään sementtiä, betonia ja kalkkia. Tässäkin tapauksessa **silmän voi turvallisesti huuhdella Cederrothin neutraloivalla silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100 % fosfaatiton.**

## PELASTA NÄKÖSI

- 1 Aloita silmän huuhtelu välittömästi.**  
Vaikutus on tehokkainta ensimmäisten sekuntien aikana.
- 2 Huuhtele runsaalla nestemäärällä.**  
Silmän täytyy olla auki huuhtelun aikana. Pidä silmää auki sormillasi.
- 3 Huuhtele pitkään, vähintään 15 minuuttia.**  
Käytä useampia pulloja huuhtelunestettä ja/ tai jatka huuhtelua silmä- tai käsisuihkulla.



#### **Vinkki!**

Katso silmänhuuhteluvideo osoitteessa [www.cederroth.com](http://www.cederroth.com)



## CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUASEMA

Neutraloiva huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmät!

Cederroth silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti silmän pH-arvoon, joten sillä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin ja saadaan tehokkaampi lopputulos kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.\* Pöly- ja roiskeuojatusta asemassa on 2 x 500 ml huuhtelunestettä, jonka säilyvyysaika on 4,5 vuotta.

**Muotoiltu huuhtelukuppi auttaa pitämään silmän auki ja ohjaa nesteen suoraan silmään.**

Läpinäkyvän huuhtelukupin kautta on helppo havaita, että silmä pysyy avoimena.

AINUTLAATUISEN  
MUOTOILU!



Neutraloiva  
vaikutus\*

### CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUASEMA

REF 721500

Mitat: L 29 X K 56 X S 12 cm

2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelu (REF 725200)  
1 Salvequick laastariautomaatti, sis.  
40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444) ja  
45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)  
1 Silmänhuuhteluohje  
1 Avain

## CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUPULLO JA SEINÄTELINE



### CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUPULLO REF 725200

2 x 500 ml, steriili, puskuroitu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin\*. Muotoiltu silmänhuuhtelukuppi auttaa pitämään silmän avoimena huuhtelun aikana. Pullo avautuu automaattisesti asemasta tai telineestä irrotettaessa. Kertakäyttöinen. Säilyvyys 4,5 vuotta.

### CEDERROTH SEINÄTELINE REF 7202

Seinäteline kahdelle 500 ml:n Cederroth silmänhuuhtelupulolle. Pulot avautuvat automaattisesti telineestä irrotettaessa, joten huuhtelu voidaan aloittaa välittömästi. Jälkivalaiseva käyttöopaste mukana. Muista lisätä myös silmänhuuhtelu opastekilpi.

### CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUPULLO REF 7221

235 ml, steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Henkilökohdainen silmänhuuhtelupullo taskukoossa, helppo pitää mukana taskussa tai yökotelossa. Kertakäyttöinen. Säilyvyys 4,5 vuotta.

### VYÖKOTELO REF 720300

Vihreästä nylonista valmistettu yökotelotasku kokoiselle Cederroth silmänhuuhtelupulolle.

\*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäsiin kuin happoihin.



# TÄYDENNYSTUOTTEET



**Cederroth huuhteluspray 150 ml**  
REF 726000

150 ml steriiliä keittosuolaliuosta pölyn ja lian huuhteluun haavoista ja silmistä. Voidaan käyttää useita kertoja ja säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka. Säilyvyys 5 vuotta.



**Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside**  
REF 1910

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen: paine-, tuki-, peite- ja palovammasiteeksi.



**Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside**  
REF 1911

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen, erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan.



**Cederroth tartuntasuojapakkaus**  
REF 2596

Suojaa suoralta kosketuksesta elvytystilanteissa. Sisältää elvytysuojan yksisuuntaisella venttiilillä, 2 paria suojakäsineitä ja 2 kpl Cederroth käsin puhdistuspyyhkeitä.



**Salvequick haavapyyhe 20 kpl**  
REF 323700

20 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiologista keittosuolaa sisältäviä haavapyyhkeitä. Sopii ensiapuasemaan (REF 490920) ja ensiapuasema Pron (REF 51011003).



**Salvequick haavapyyhe 40 kpl**  
REF 3227

40 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiologista keittosuolaa sisältäviä haavapyyhkeitä. Sopii Haavanhoitoautomaattiin (REF 51011006 ja 51011009)



**Cederroth Soft laastari 2 m**  
REF 51011011

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari. Soveltuu pieniin haavoihin ja toimii erilaisissa olosuhteissa riippumatta lämmöstä, kylmästä, kosteudesta tai kuivuudesta ja pysyy jopa vedessä. Laastarin leveys 6 cm.



**Cederroth Soft laastari 4,5 m**  
REF 51011010

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari. Soveltuu pieniin haavoihin ja toimii erilaisissa olosuhteissa riippumatta lämmöstä, kylmästä, kosteudesta tai kuivuudesta ja pysyy jopa vedessä. Laastarin leveys 6 cm.



**Salvequick muovilaastari**  
REF 6036

45 kpl vettä ja likaa hylkivää muovilaastaria. Hyvin kiinnittyvä, joustava ja allergiatestatu. 6 täydennyspakkausta/rasia.



**Salvequick kangaslaastari**  
REF 6444

40 kpl kankaista, joustavaa, hengittävää ja hyvin kiinnittyvää peruslaastaria. Allergiatestatu. 6 täydennyspakkausta/rasia.



**Salvequick iso kangaslaastari**  
REF 6470

21 kpl leveää, joustavaa ja hengittävää kangaslaastaria isomman haavan hoitoon. Allergiatestatu. 6 täydennyspakkausta/rasia.



**Salvequick sormenpäälaastari**  
REF 6454

15 kpl joustavaa ja hyvin kiinnittyvää sormenpäälaastaria. Muotoilun ansiosta heppo kiinnittää. 6 täydennyspakkausta/rasia.



**Salvequick erikoispitkä kangaslaastari**  
REF 6496

30 kpl erikoispitkiä ja joustavia kangaslaastareita. 12 cm pitkä kiinnitysteippi mahdollistaa haastavatkin paikat, kuten peukalon tyven. Allergiatestatu. 6 täydennyspakkausta/rasia.



**Salvequick Instant Cold Pack**  
REF 219600

Kertakäyttöinen kylmähaude venähdysten ensiapuun, lievittää särkyä ja turvotusta.

## OPASTEKILVET

**Nuoli**  
REF 1735

Kaksipuolinen, jälkivalaiseva 20 x 20 cm

**Risti**  
REF 1738

Kaksipuolinen, jälkivalaiseva 20 x 20 cm

**Silmänhuutelu**  
REF 1740

Kaksipuolinen, jälkivalaiseva 20 x 20 cm

**Seinäpidike**  
REF 1750

Itsekiinnittyvä muovinen seinäpidike opastekilvelle.



## Työpaikan ensiapuvalmius

ensiapukurssit@terveystalo.com  
www.terveystalo.ensiapuvalineet.com