

SkillGuide palauteyksikön käyttöohjeet

Käyttöönotto

- aseta QCPR Resusci Anne ”istuma-asentoon” itseäsi vasten, jotta saat nukken oikeassa olkavarressa sijaitsevan SkillGuiden liitinpaikan paremmin näkyville
- työnnä SkillGuiden virtaliitin varovasti **pohjaan saakka**, kts. kuvat.
- kytke nukkeen virta päälle, jolloin myös SkillGuiden valot syttyvät. Jos SkillGuiden valot eivät pala, pistoke ei ole riittävän syvällä.



Käyttö: **1. HARJOITUSTILA** -SkillGuiden vasen lamppu valittuna

Mittari ilmoittaa reaaliaikaisen palautteen PPE -harjoituksen aikana

- painallusten kpl-määrän sekä painelun syvyys (DEPTH). Onnistuneet osat alueet ilmoitetaan vihreällä valolla ja liian matalat painallukset tai vajaaksi jääneet rintakehän palauttamiset (RELEASE) oranssilla valolla
- väärä käsien paikka sekä painelun taajuus (RATE) joko vihreällä valolla 100-120/min. tai oranssilla kun painelun tahti on joko liian hidaskun tai nopea
- puhallusten määrän ja varoituksen liiallisesta puhalluksesta keuhkojen ylitäytön varoitusmerkillä
- PE:n kokonaisaika ilmoitetaan näytön vasemmassa alakulmassa



HUOM! Paina SkillGuiden mustaa painiketta vaihtaaksesi tilasta seuraavaan.

2. PPE -TESTAUSTILA -SkillGuiden keskimäinen lamppu valittuna

Mittarin näyttämä reaalipalaute on PPE -suorituksen ajan Off-tilassa. Mittarin vasemmassa alanurkassa näytetään vain testiin käytetty aika.



3. PALAUTETILA -SkillGuiden oikeanpuoleinen suurennuslasi valittuna, jolloin SkillGuide ilmoittaa PPE -harjoituksen tai testauksen lopulliset tulokset.



- painelut ilmoitetaan onnistumisprosentteina kokonaismäärästä. Mittari näyttää oranssilla valolla ne aihealueet mitä oppilaan tulee parantaa seuraavaan suoritteeseen. (kuvassa paineluista osa jäänyt liian matalaksi)
- puhallusten onnistuminen prosentteina sekä keuhkojen kuvassa suora palaute joko liian suurista tai vajaista puhalluksista.
- elvytykseen käytetty kokonaisaika ilmoitetaan vasemmassa alanurkassa
- paineluun käytetty aika kokonaisajasta ilmoitetaan oikeassa alanurkassa

Uuden harjoituksen aloittaminen

Nollataksesi harjoituksen tiedot SkillGuidesta ennen seuraavaa suoritusta, paina SkillGuiden nappia kolme sekuntia kunnes mittarin valot välähtävät oranssina.

Lopetus

Sammuta nukesta ensin virta. Kun SkillGuiden merkkivalot ovat sammuneet, irrota liitin nukesta **pitämällä kiinni liittimen rungosta**, ei johdosta vetämällä.

IRROTA SKILLGUIDE PISTOKKEESTA, ÄLÄ JOHDOSTA VETÄMÄLLÄ!



Tilaukset ja lisätiedustelut

Tammed Oy
Puh 03-2606 530
www.tammed.fi
myynti@tammed.fi

