


SYDÄNPYSÄHDYS

Jos potilas ei ole herätettävissä eikä hengitä, **SOITA HÄTÄNUMEROON 112**. Aloita välittömästi paineluelvytys ja pyydä muita tuomaan defibrillaattori.


1. Kytke virta FR3-defibrillaattoriin.



2. Ota elektrodit elektrodisuojasta.

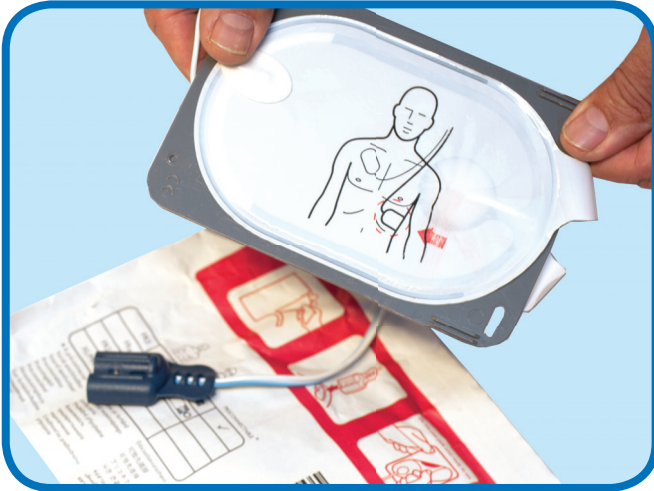

3. Kiinnitä elektrodit potilaan rintakehälle.

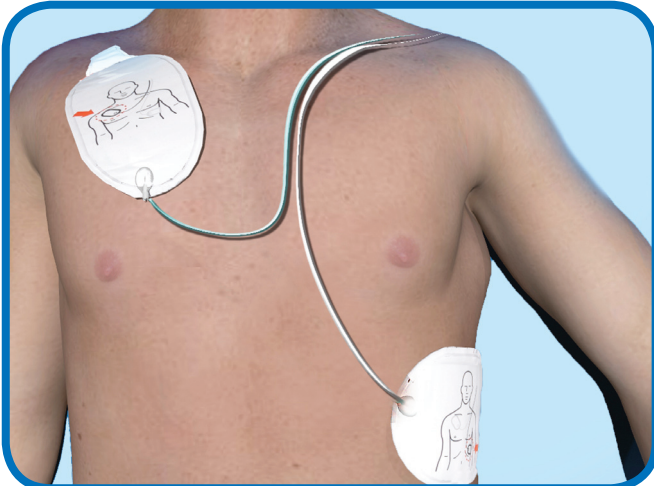

4. Potilaaseen EI SAA KOSKEA sydämen rytmin analysoinnin aikana!

5. Paina vilkkuvaa oranssia iskupainiketta, jos kone kehottaa. Pysy IRTI POTILAASTA.



6. Jatka paineluelvytystä välittömästi iskun antamisen jälkeen. Seuraa jatkossa koneen antamia ohjeita.



Voit lopettaa elvytyksen, kun saat siihen luvan, potilaan hengitys palautuu tai omat voimasi loppuvat.



Lataa viereisellä QR-koodilla puhelimeesi PPE-D -ohjeet ja katso opetusvideo.

 **tammed**[®]