

# SYDÄNPYSÄHDYS

Jos potilas ei ole herätettävissä eikä hengitä, **SOITA HÄTÄNUMEROON 112**. Aloita välittömästi paineluelvytys ja pyydä muita tuomaan defibrillaattori.


**1.** Kytke virta FRx-defibrillaattoriin.



**2.** Avaa harmaa elektrodiasia.



**3.** Kiinnitä elektrodit potilaan rintakehälle.

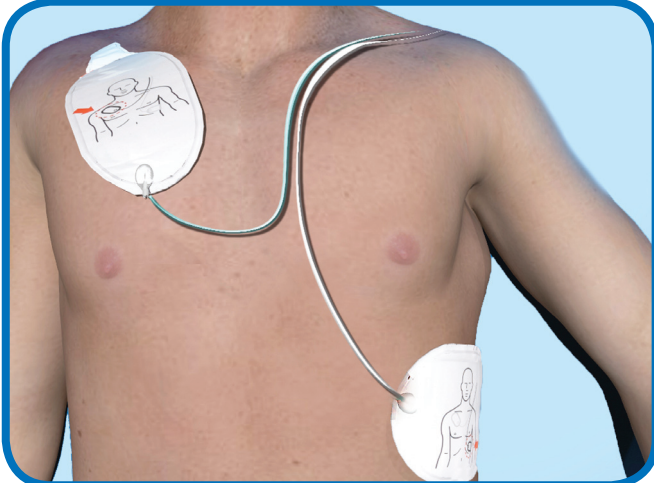

**4.** Potilaaseen EI SAA KOSKEA sydämen rytmin analysoinnin aikana!

**5.** Paina vilkkuvaa oranssia iskupainiketta, jos kone kehottaa. Pysy IRTI POTILAASTA.



**6.** Jatka paineluelvytystä välittömästi iskun antamisen jälkeen. Seuraa jatkossa koneen antamia ohjeita.



Voit lopettaa elvytyksen, kun saat siihen luvan, potilaan hengitys palautuu tai omat voimasi loppuvat.



Lataa viereisellä QR-koodilla puhelimeesi PPE-D -ohjeet ja katso opetusvideo.

 **tammed**<sup>®</sup>