

# Внезапная остановка сердца

При отсутствии у пациента сознания и дыхания немедленно **вызывай скорую помощь** и начинай непрямой массаж сердца. Попроси окружающих принести дефибрилятор.


**1.** Включи FRx дефибрилятор.



**2.** Открой серую коробочку с электродами.



**3.** Прикрепи электроды к грудной клетке пациента (как показано на рисунке).

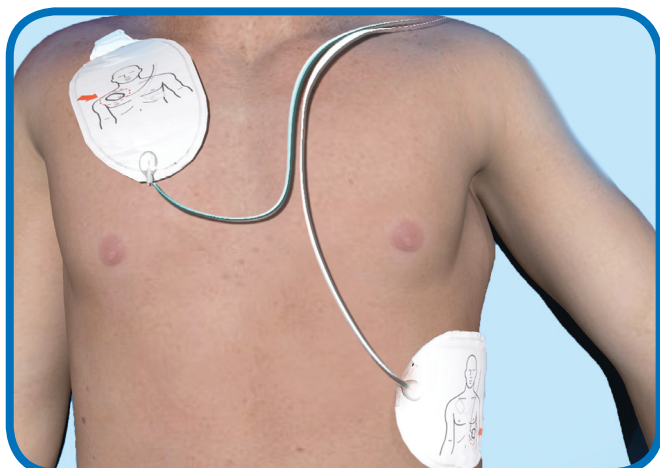

**4.** К пациенту **нельзя прикасаться** всё время, пока дефибрилятор анализирует ритм.

**5.** Нажми мигающую оранжевую кнопку, если аппарат рекомендует дефибрилляцию. **НЕ ПРИКАСАЙСЯ** к пациенту во время дефибрилляции.



**6.** Продолжай без промедления непрямой массаж сердца. В дальнейшем следуй инструкциям аппарата.



Реанимацию можно прекратить когда получишь соответствующее разрешение или если дыхание пациента восстановилось, или собственные силы на исходе.



Ты можешь загрузить в телефон при помощи QR-кода инструкцию по сердечно-лёгочной реанимации и просмотреть обучающее видео.

