

# HJÄRTSTILLESTÅND

Om patienten inte är i medvetande eller andas, **RING 112**. Börja med att direkt ge hjärt-lungräddning (HLR) och be någon annan hämta en defibrillator.


**1.** Slå på FRx defibrillatoren och följ instruktionerna.



**2.** Öppna det grå elektrodfacket och ta fram elektroderna.



**3.** Placera elektroderna på patientens bröst-korg enligt anvisningarna på förpackningen.

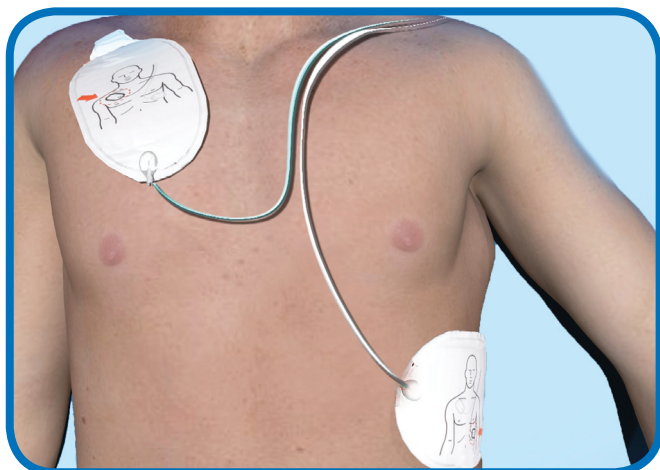

**4.** RÖR INTE PATIENTEN då defibrillatoren analyserar hjärtrytmen.

**5.** Tryck på den orangefärgade chock knappen då maskinen uppmanar till det. RÖR INTE PATIENTEN.



**6.** Fortsätt ge hjärt-lungräddning (HLR) direkt efter att defibrilleringen har utförts. Fortsätt följa instruktionerna som defibrillatoren ger.



Du kan avsluta hjärt-lungräddningen om patienten visar tydliga livstecken eller om medicinsk personal uppmanar dig att sluta. Det kan också hända att dina krafter tar slut innan dess, sök då hjälp av någon som kan ta över.



Du kan ladda ner i din telefon hjärt-lungräddnings instruktioner samt se utbildningsvideon genom att skanna bifogade QR-kod.

