

# iRESCUE

## I-GELIN KÄYTTÖOHJE




1. Valitse i-gel potilaan painon mukaan.



2. Tarkista ja tyhjennä nielu.



3. Pidä pää taaksepäin taivutettuna ja työnnä i-gelin pehmeä kärki kohti takanielua kunnes kärki saavuttaa ruokatorven pään. Etuylähampaiden tulisi sijoittautua vaakaviivan tasolle.

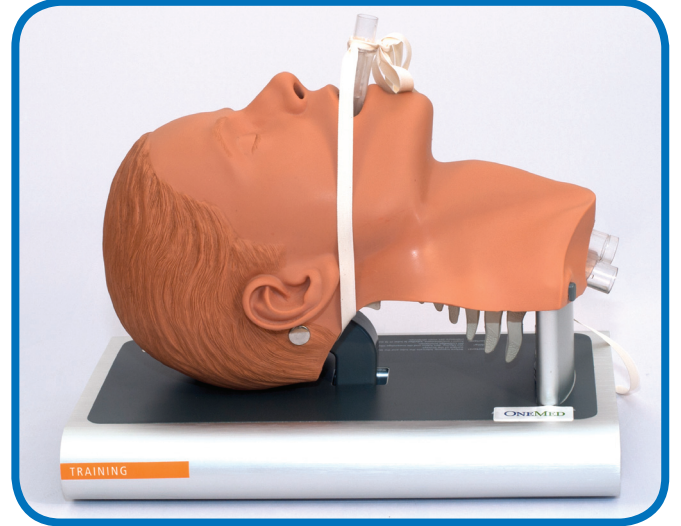

4. Kiinnitä i-gel teipillä tai kanttinauhalla ja kiinnitä hengityspalje.



5. Varmista i-gelin toimivuus ja kuuntele hengityssänet rintakehän lisäksi myös kaulalta. Muista painantaelvytyksessä taukoventiloinnin aikana.

 tammed®

PL 298 • 33101 Tampere • (03) 2606 530  
Erkkilänkatu 11 A 1. krs

[www.tammed.fi](http://www.tammed.fi)