

# SimPad Classic-päätelaitteen ja Resusci Anne QCPR päivittäminen

## 1. Lataa SimPad - päätelaite verkkovirtajohdolla

SimPad -päätelaitteessa on oltava vähintään 30% akun varaustila.

## 2. Lataa asennustiedosto Laerdalin sivuilta

<https://www.laerdal.com/fi/SimPad#/Downloads>

## 3. Liitä SimPad tietokoneeseen

Käytä laitteen mukana tullutta micro-USB-kaapelia.

## 4. Siirrä asennustiedosto SimPadin juureen

Poista SimPad tietokoneesta turvallisesti, päivitys alkaa automaattisesti.

## 5. SimPad suorittaa päivityksen automaattisesti

Päivitys voi kestää 2-10 minuuttia. Päivityksen jälkeen SimPad palaa aloitusnäyttöön. SimPad on nyt päivitetty.

## 6. Kytke SimPad USB-kaapelilla Resusci Anneen

Resuci Anne päivitetään SimPadin kautta. Käytä laitteen mukana tullutta USB-kaapelia. Kun USB-kaapeli on kytketty, nukke käynnistyy automaattisesti.

## 7. Siirry BLS Instructor -ohjelmaan

Laite kysyy päivitetäänkö nukke, valitse "upgrade now" aloittaaksesi päivityksen.

## 8. Päivitys voi kestää useamman minuutin

Päivityksen jälkeen SimPad ja Resusci Anne on päivitetty uusimpaan ohjelmistoversioon. Päivitä aina SimPad ja Resusci Anne QCPR samaan aikaan.



# SimPad PLUS-päätelaitteen ja Resusci Anne QCPR päivittäminen

## 1. Lataa SimPad PLUS - päätelaite verkkovirtajohdolla

SimPad -päätelaitteessa on oltava vähintään 30% akun varaustila.

## 2. Kytke laite internetiin Wifi-verkon kautta

## 3. Valitse aloitusnäytöstä Upgrade

Laite voi myös kysyä automaattisesti, päivitetäänkö laite.

## 5. SimPad PLUS suorittaa päivityksen automaattisesti

Päivitys voi kestää 2-10 minuuttia. Päivityksen jälkeen SimPad PLUS palaa aloitusnäyttöön. SimPad PLUS on nyt päivitetty.

## 6. Kytke SimPad USB-kaapelilla Resusci Anneen

Resusci Anne päivitetään SimPadin kautta. Käytä laitteen mukana tullutta USB-kaapelia. Kun USB-kaapeli on kytketty, nukke käynnistyy automaattisesti.

## 7. Siirry BLS Instructor -ohjelmaan

Laite kysyy päivitetäänkö nukke, valitse "Upgrade now" aloittaaksesi päivityksen.

## 8. Päivitys voi kestää useamman minuutin

Päivityksen jälkeen SimPad ja Resusci Anne on päivitetty uusimpaan ohjelmistoversioon. Päivitä aina SimPad ja Resusci Anne QCPR samaan aikaan.

